

ERGO2 sedadlo nabízí větší svobodu – lepší kvalitu života

Standard pro všechny sedadlové systémy ERGO2



Sklon sedadla

Opěrku na záda lze nastavit ve sklonu 45° dozadu a 90° dopředu. To se dělá zatažením za páčku na pravé straně sedadla.



Po sklopení zádové opěrky dolů, sejmutí opěrky hlavy a sklopení sloupku řízení bude mít Mini Crosser výšku pouhých 75 cm.



Případně můžete otočit sedadlo; pak ho posuňte dopředu, sejměte opěrku hlavy a sklopte sloupek řízení a výška skútru bude pouhých 72 cm.

V závislosti na systému sedadlové tyče a velikosti pneumatik



Hloubka sedadla

Zádovou opěrku lze nastavit do hloubky 320 mm až 550 mm. Nastavení hloubky sedadla je důležité, pro správnou oporu lýtek a zad.





Páčka pro otáčení sedadla

Pro otočení sedadla zatáhněte za páčku dozadu nebo vpřed, podle toho, na které straně je namontovaná. Sedadlo lze otočit na kteroukoli stranu, se zastavením každých 45°.

Pružina páčky sedadlo automaticky uzamkne v dané poloze, když se páčka uvolní.

Tato páčka je standardně umístěna vpravo, ale může se umístit také na levou stranu.

Pokud je páčka vlevo, musíte na ni zatlačit dopředu, abyste mohli otočit sedadlem, místo zatažení. Lze také upravit délku páčky, pro snadnější manipulaci a také ji lze snadno přesunout na druhou stranu.



Páčka pro posun sedadla vpřed / vzad

Sedadlový systém ERGO2 používá dvě posuvné kolejničky s kladkou, což ulehčuje nastavení. Sedadlo se posune dopředu nebo dozadu podle potřeby, až na vzdálenost 200 mm.

Uvolněním páčky se sedadlo automaticky uzamkne v nejbližší poloze.

Systém sedadlové tyče pro ERGO2 také poskytuje pevnou a bezpečnou polohu pro sezení.



Nastavení výšky ručních opěrek


Výšku ručních opěrek lze nastavit jednotlivě. Až o 140 mm od nejnižšího bodu po nejvyšší polohu.

To pomůže zajistit správné zarovnání. Ruční opěrky lze nastavit samostatně, takže nastavením výšky poskytnou pohodlnou oporu.




Mini Crosser

ERGO 2 sedadlo

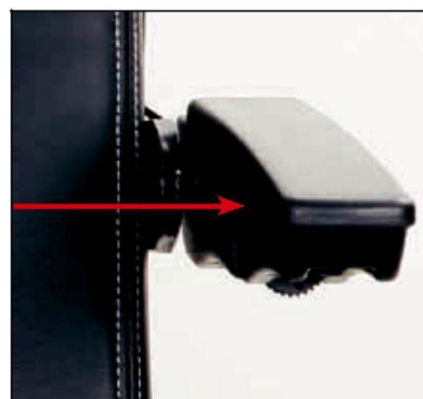

Nastavení šířky ruční opěrky

Každou ruční opěrku lze samostatně posouvat o 25 mm na každou stranu.

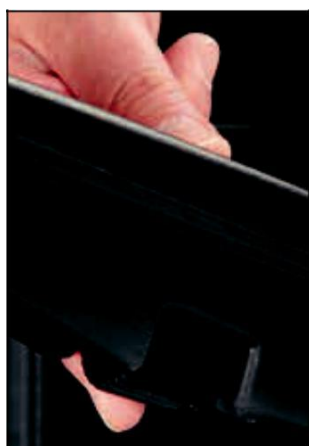

Nastavení úhlu ruční opěrky



Nastavení výšky opěrky hlavy / Nastavení opěrky hlavy dopředu nebo dozadu

Opěrku hlavy lze nastavit ve směru nahoru nebo dolů a dozadu nebo dopředu. Podpora krku, pro ERGO2 Sedadlo - M-127-7-200

V kombinaci s možnostmi nastavení pro sedadlový systém ERGO2 spolu s možnostmi nastavení u M-Modelů Mini Crosser jsme se snažili poskytnout nejlepší pohodlí při sezení pro každého uživatele.

Ve zkratce, nabízíme možnost

- Nastavení sklonu řídítek
- Nastavení výšky řídítek
- Výška sedadla
- Sklon sedadla
- Hloubka sedadla
- Výška ručních opěrek
- Sklon ručních opěrek
- Šířka ručních opěrek
- Nastavení opěrky hlavy



EBLO sedadlo

Základní sedadlo.

S možností nastavení úhlu pro zádovou opěrku, nastavení výšky ručních opěrek. Opěrka hlavy a posuvné kolejničky.

EBLO sedadlo, šířka sedadla 46 cm, hloubka sedadla 45 cm. M-127-07-022



Zadní košík, univerzální - od 34 cm do 70 cm
M-127-06-164



Břišní bezpečnostní pás pro sedadlo Eblo & Ergo 65 až 125 cm
T-127-06-144

ERGO HD sedadlo

Sedadlo ERGO HD bylo dodatečně zpevněné u sedadla a ruční opěrky pro uživatele s vyšší váhou až do 250 kg.
60 cm šířka sedadla
M-127-07-101
65 cm šířka sedadla
M-127-07-102
70 cm šířka sedadla
M-127-07-103
Polstrovaní ruční opěrky, kůže
- 70x350 mm,
Vpravo CR-00787
Polstrovaní ruční opěrky, kůže
- 70x350 mm, Vlevo
CR-00788



Ergo dětské a junior sedadla

Naše Ergo sedadlo je přizpůsobené dětem a mladým lidem.
Dětské sedadlo: šířka 35 cm, hloubka 20 - 30 cm.
M-127-07-008
Junior sedadlo: šířka 37 cm, hloubka 25 - 40 cm.
M-127-07-007
Případně je možnost použít sedadlo pro dospělé.



Možnost převodovky

Mini Crosser nabízí 3 různé nastavení rychlosti. Nicméně, v určitých krajinách jsou zákony omezující rychlost u výrobků pro mobilitu. Zeptejte se vašeho místního prodejce nebo místních úřadů na dopravní předpisy. U skútrů Mini Crosser MaxX, Mini Crosser HD a Mini Crosser Joy, je rychlostní limit nastaven na 10 km/h

Nabízíme

- 10 km/h verze – tahle verze je vhodná pro kopcovitý terén a jízdu v terénu
- 13 km/h (8 mp/h) verze – vhodná pro jízdu v terénu
- 15 km/h verze – běžně využívaná na rovných cestách a trávě

Pro zajištění vašeho bezpečí může být Mini Crosser - jak 3, tak 4-kolový vybaven redukcí rychlosti při zatáčení.

Čidlo, poloviční rychlost 3K, M-model
M-127-06-170

Čidlo, poloviční rychlost 4K, M-model
M-127-06-208

Rodičovský klíč



Pro zajištění bezpečnosti dětí a mladých lidí nabízíme různá řešení.

Rodičovská rychlost s potenciometrem - M-127-06-135

Omezení rychlosti, spínač - T-127-06-121

Upozorňujeme, že všechny modely Mini Crosser M2 mají tento standard.